

AcuEar Pebble

User Manual



Model No.: PHA-126M



Table des matières

Présentation du produit (écouteurs).....	25
Aperçu du produit.....	25
Fonctions des boutons.....	26
Indicateurs LED.....	27
Présentation Du Produit (Micro de table et étui de chargement 2-en-1).....	27
Aperçu du produit.....	27
Fonctions des boutons.....	28
Indicateurs LED.....	28
Chargement des écouteurs et de l'étui.....	29
Utilisation comme oreillettes Bluetooth TWS.....	30
Utilisation comme amplificateurs auditifs avec le micro de table.....	31
Utiliser un écouteur mono.....	33
Spécifications.....	33
FAQ.....	34
Nous contacter.....	57

Présentation du produit (écouteurs)

Aperçu du produit

FR

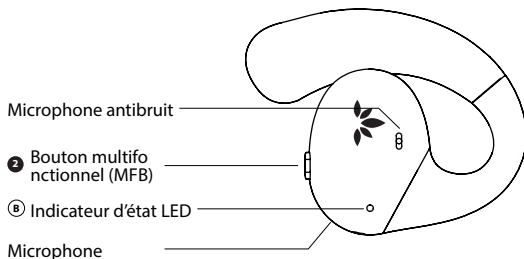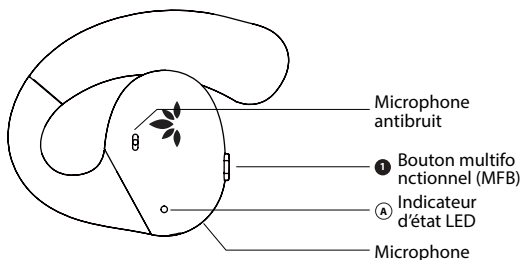

Fonctions des boutons


No.	Bouton	Fonctions
1 ou 2	MFB En L / R oreillette	Double-tap pour lire / mettre en pause
		Tapez une fois pour accepter l'appel
		Double-tap pour mettre fin à l'appel
		Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil
2		Lors de l'utilisation d'un seul écouteur, appuyez une fois pour faire défiler les 8 niveaux de volume.
1	MFB sur l'oreillette L	Lorsque vous utilisez les deux écouteurs, tapez une fois pour diminuer le volume.
2	MFB sur l'oreillette R	Lorsque vous utilisez les deux écouteurs, tapez une fois pour augmenter le volume.


Indicateurs LED

No.	Indicateurs et invite vocale	Statut
A	Bleu continu pendant 1 seconde	Marche
	Rouge fixe pendant 1 seconde puis éteint	Arrêt
	Bleu fixe pendant 5 secondes puis éteint, indicateur vocal "CONNECTED" ou "HEARING MODE".	Connecté
	Rouge solide	Chargement
	LED éteint	Chargement complet
	Clignotements alternés rouge et bleu, indicateur vocal "PAIRING".	Couplage


Présentation Du Produit (Micro de table et étui de chargement 2-en-1)

Aperçu du produit

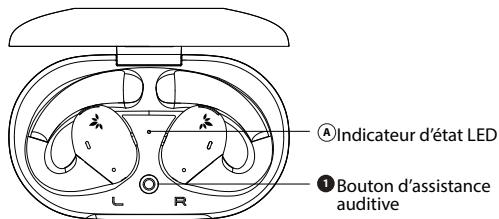

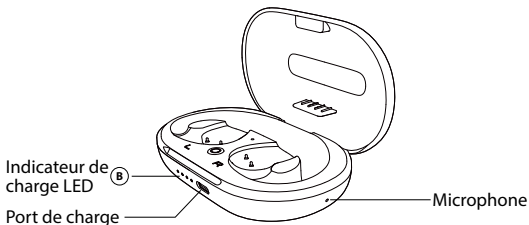

Fonctions des boutons

No.	Bouton	Fonctions
1		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes fois pour activer ou désactiver le mode d'assistance auditive


Indicateurs LED

No.	Indicateurs et invite vocale	Statut
A	Bleu solide	Écouter l'assistance sur
	Rouge fixe pendant 1 seconde puis éteint	L'assistance auditive est désactivée
	Clignotements rouges et bleus alternés	Mode d'appairage
B	Flash blanc toutes les secondes	Chargement
	Blanc fixe sur quatre LED	Chargement complet

Chargement des écouteurs et de l'étui


Pour charger les écouteurs :

Placez les écouteurs dans l'étui, puis fermez l'étui. Des voyants rouges fixes sur les écouteurs indiquent que la charge est en cours ; lorsque les voyants s'éteignent, vos écouteurs sont à pleine charge.

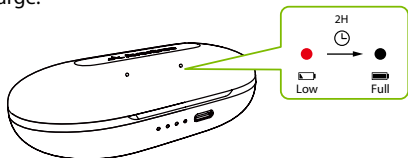

Pour recharger l'étui :

Si votre boîtier est à court de batterie, lorsque vous l'ouvrez puis le fermez, les 4 LED du boîtier clignoteront en blanc et vous devrez le recharger afin de recharger vos écouteurs. Branchez le câble de charge USB C fourni dans le port de charge, puis connectez l'autre extrémité à un adaptateur USB de 5V/ 500mA-2A (votre chargeur de téléphone ou similaire devrait fonctionner) ou au port USB d'un PC.

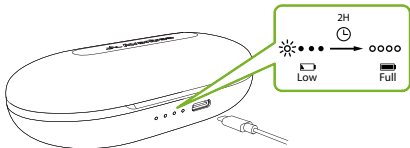


Les indicateurs de charge LED de l'étui clignotent en blanc pour indiquer l'état de charge. Lorsque la charge est complète, les quatre DEL deviennent blanches fixes.

Utilisation comme oreillettes Bluetooth TWS

ÉTAPE 1

Lorsqu'elles sont retirées de l'étui de chargement, les oreillettes passent automatiquement en mode PAIRING, comme l'indique le clignotement des DEL BLEUE et ROUGE.

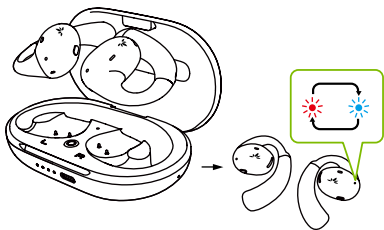

ÉTAPE 2

Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez " Avantree AcuEar Pebble " dans le menu Bluetooth.

ÉTAPE 3


attendez 5 à 10 secondes ou jusqu'à ce qu'elles se connectent. Une fois la connexion établie, le voyant DEL des deux oreillettes devient bleu fixe pendant 5 secondes, puis s'éteint.

Pour une utilisation ultérieure, cliquez une fois sur le bouton MFB pour vous reconnecter au dernier appareil couplé ou sélectionnez « Avantree AcuEar Pebble » dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Utilisation comme amplificateurs auditifs avec le micro de table


FR

Le micro de table capte les voix des participants à la réunion et les envoie directement dans vos oreilles.

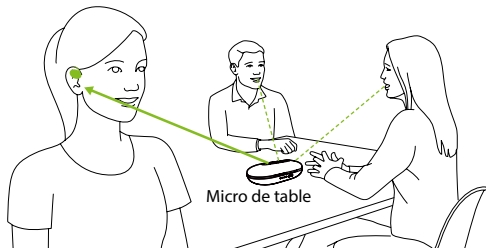


ÉTAPE 1

Appuyez longuement sur le bouton "Hear Assist" pendant 2 seconde sur le micro de table ; le micro de table entrera en mode auditif, indiqué par le clignotement de la LED BLEUE.

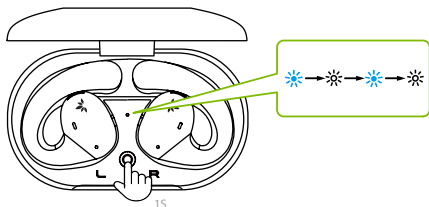

ÉTAPE 2

Attendez quelques secondes. Le micro de table et les écouteurs se connectent avec succès, comme l'indique le voyant lumineux de l'étui qui devient bleu fixe.

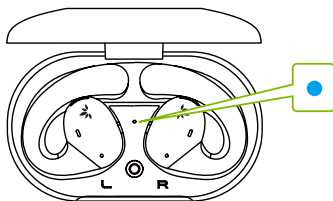

REMARQUE : Votre microphone fonctionne généralement dans un rayon de 10 mètres / 33 pieds autour de votre amplificateur auditif. Notez que les corps humains et les murs peuvent réduire cette distance. Pour maximiser la portée, assurez-vous que vous pouvez voir le microphone AucEar Pebble (c.-à-d. ligne de mire).

Passer en mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton "Hear Assist" du micro de table et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour l'éteindre. Les oreillettes passeront automatiquement en mode Bluetooth. Vous pouvez ensuite sélectionner "Avantree AcuEar Pebble" dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Utiliser un écouteur mono

Les oreillettes R / L peuvent être utilisées séparément. Lorsque vous utilisez un écouteur mono, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton pour faire défiler les 8 niveaux de volume.

FR

Spécifications

Ecouteurs

Version BT	5.3v
Prise en charge des codecs audio	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Temps de jeu	Jusqu'à 10 heures
Playtime & étui de chargement	Jusqu'à 35 heures
Temps	2hrs
Drivers	16.5mm
Impedance	22Ω
Poids	26g

Microphone de table et étui de chargement

Version Bluetooth	5.3v
Prise en charge des codecs audio	LC3
Temps de jeu	Jusqu'à 56 heures
Temps de charge	2hrs
Poids	78g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus fréquemment posées lors de l'installation.

FR

Les écouteurs ne peuvent pas se connecter au micro de table.

- Mettez les écouteurs en mode d'appairage - Mettez les écouteurs dans l'étui et désactivez le Bluetooth sur votre téléphone mobile. Les écouteurs entreront automatiquement en mode d'appairage, indiqué par la LED clignotant en BLEU et ROUGE.
- Entrez le boîtier en mode d'appairage - Lorsque le boîtier est éteint, maintenez enfoncé le bouton du boîtier pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que la LED clignote en BLEU et ROUGE.
- Gardez les écouteurs et l'étui ensemble et ils se connecteront les uns aux autres.

N'entendre qu'avec un écouteur/un son latéral

Comment régler le volume des écouteurs ?

Vous pouvez trouver une liste complète de FAQ sur avantree.com/support/acuear-pebble, ou nous contacter directement pour une assistance supplémentaire.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/acuear-pebble



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: PHA-126M
Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-126M-V1